



Käyttöaihe:  
 Suojaus ihovaurioihin, jotka ovat aiheutuneet kitkasta ja eritteistä (inkontinenssi).  
 Vedenkestävä kiinnitys varsinaisiin siteisiin esim. taitokset, alginaattisiteet tai polyuretaanivaahtoside.

## Kalvoside rullassa

MEDIPLAST tarjoaa tehdaspuhtaita, läpinäkyviä kalvositeitä rullassa. Joustaa ja muotoutuu kehon muodon mukaan, mikä mahdollistaa vapaan liikkumisen ilman että iho vahingoittuu. Tuote on tehdaspuhdas, eikä sitä saa käyttää vahingoittuneella iholla, avohaavoilla tai IV-kanyylin siteenä. Rulla on yksittäispakattu laatikkoon.

Pituus: 10 metriä

Tuotenro	Kuvaus	Kpl/ os.pakk.	Kpl/ kulj.pakk.
60701005	5 cm	1	48
60701010	10 cm	1	24
60701015	15 cm	1	24


Sailab koodi – BE03002

### Tee näin:

Leikkaa toivottu pituus.

Poista valkoinen suojapaperi ja kiinnitä kalvo iholle.

Poista yläpuolella oleva läpinäkyvä suojakalvo vetämällä nuolien osoittamaan suuntaan..

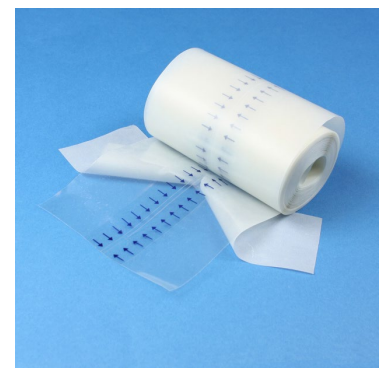

Os.pakk = pienin toim.erä