



Koskee moduuleita 7047A001,7047A011 ja 7047A016.

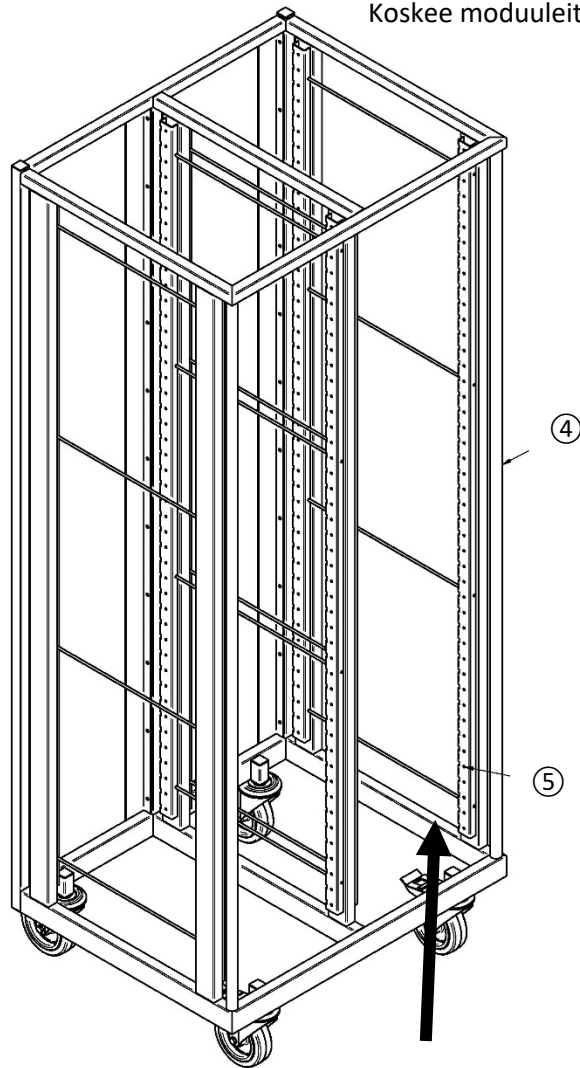

Irrota kehukset ylöspäin

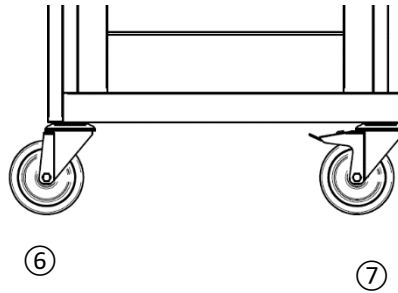


1	Ulosvedettävä hylly	7047A028
2	Kisko vasen (sisältyy yllä olevaan tuotteeseen)	
3	Kisko oikea (sisältyy yllä olevaan tuotteeseen)	
4	Runko	7047A003
5	Kehys	7047A005
6	Pyörä	8470UFX125P30-13
7	Jarrullinen pyörä	8477UFD125P30-13
-	Katto ja pohja	70470047
-	Kiinteä hyllytaso	70470001

## Hyllytason korkeuden muuttaminen

1. Poista hyllytaso.
2. Irrota kehys (5). Pidä kehuksesta kiinni ja napauta sitä kevyesti, kunnes se irtoaa. Käytä esimerkiksi muovi- tai nailonvasaraa.
3. Poista kehys (5).
4. Kiskoihin (2&3) kevyt "napautus" niiden irrottamiseen.
5. Laita kiskot (2&3) haluttuun paikkaan, napauta tai vedä ne paikalleen.
6. Ripusta kehys (5) runkoon (4) ja napauta vasaralla ylhäältä, kunnes kehys on paikallaan.

HUOM! Älä käytä voimaa.  
Kevyet napautukset riittävät.

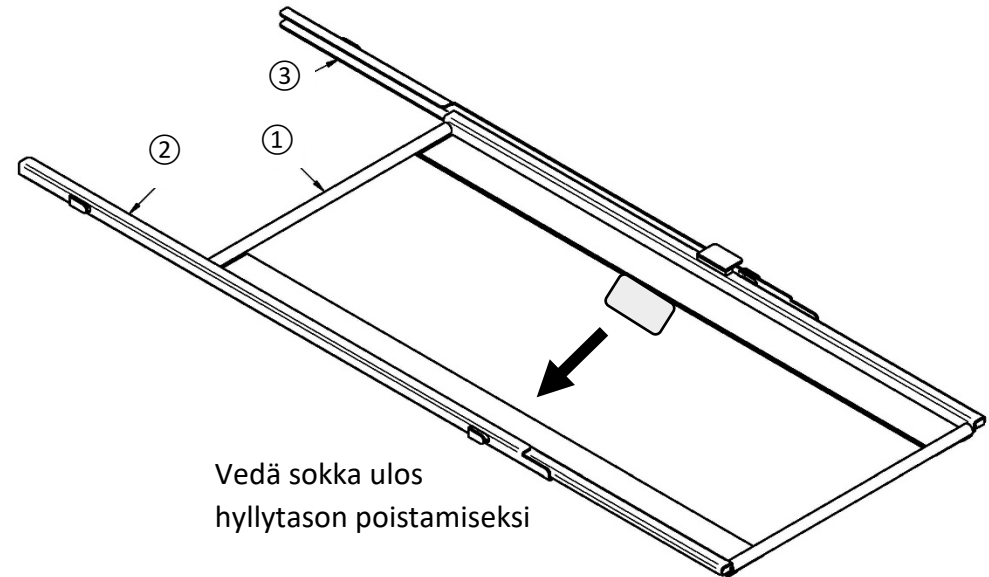

Vedä sokka ulos  
hyllytason poistamiseksi

**MEDI PLAST**

Mediplast Fenno Oy – Tähtäinkuja 9 – 01530 Vantaa

Puh: 09 276 360 - asiakaspalvelu@mediplast.com

FI 20230731 rev 1

SILVER STÅL