

SteriSet-sterilointikontainerit

Innovatiivista kontaineriteknologiaa

MEDI PLAST



Kaksinkertainen suojakansi

- Kestävä ruostumaton teräs/alumiini suojaa arvokkaita välineitä ja sisäventtiiliä
- Tilaa säästävä muotoilu mahdollistaa jopa 3 kontainerin pinoamisen sterilointilaitteeseen
- Suojaa pölyltä, liialliselta kosteudelta ja muilta epäpuhtauksilta, mikä parantaa hygieniää

Venttiili ruostumatonta terästä

- Auttaa takaamaan steriiliyden ja vähentää jätettä
- Ei tarvetta kertakäyttöisiin paperisuodattimiin
- Avautuu automaattisesti painetoiminnon avulla esityhjiöhöyrysterilointisyklin aikana
- Venttiili pysyy kiinni steriloinnin jälkeen muodostaen läpäisemättömän sulun, joka pitää sisällön steriilinä

Turvalukitus

- Lämpöherkkä ThermoLoc-älylukitusjärjestelmä lukitsee kannen paikalleen sterilointisyklin ajaksi
- Ei tarvetta kertakäyttöisille muovilukoille
- Luvattoman käsittelyn estävä turvalukitus
- Varmistaa, että kontaineri pysyy suojattuna, kunnes se avataan leikkaussalissa
- Selkeästi värikoodatut kahvat ja etiketit helpottavat kontainerin valintaa

Kondensaatioveden tyhjennys painaville kuormille

- Ihanteellinen yli 8 kg painaville sarjoille tai olosuhteisiin, joissa on märkää höyryä
- Avautuu, kun sterilointilaitteen lämpötila on 130 °C, jolloin jäljellä oleva kondensaatiovesi pääsee vapautumaan kontainerista
- Kun sterilointilaitte on jäähtynyt 110 °C:seen, poistoventtiili sulkeutuu varmistaen, että instrumentit pysyvät kuivina ja täysin suojattuina



Ennen



Jälkeen

Nämä säiliöt ovat luokan I epästeriilejä lääkinällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Lue käyttöohjeet ja varoitukset pakkauksesta ennen käyttöä.

EC REP Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44100 Oudon-sur-Loire, France

Tämän dokumentin käännöksen teki Medioplast Fenno Oy. Saadaksesi Medlinen verifioiman englanninkielisen version, käänny jakelijan puoleen. Varaamme oikeuden korjata tässä esitteessä mahdollisesti esiintyviä virheitä. © 2021 Medline Industries, Inc. Medline on Medline Industries, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML873_FI 08/2021

Jälleenmyyjä:
Medioplast Fenno Oy
PL 153, 01531 Vantaa
Suomi
Puh 09 276 360

asiakaspalvelu@mediplast.com
www.mediplast.com