


AMT Ballongillinen Gastroletku



Kliiniset edut

- Korvaa avanteessa käytettäviä ravitsemusjärjestelmiä
- Laadukas ballonki takaa pitkän käyttöiän
- Laaja kokovalikoima
- Steriili yksittäispakkaus
- Käyttöohje pakkauksessa

Tuotenro	Kuvaus	Ballongin minimitäyttötilavuus	Suosittelu Ballongin täyttötilavuus	Ballongin maksimitäyttötilavuus	Os./kulj.pakk.
7-1210-I	12FR	2 ml	2,5 ml	3 ml	1/1
7-1410-I	14FR	3 ml	4 ml	5 ml	1/1
7-1610-I	16FR	4 ml	6 ml	8 ml	1/1
7-1810-I	18FR	6 ml	8 ml	10 ml	1/1
7-2010-I	20FR	7 ml	10 ml	15 ml	1/1
7-2410-I	24FR	7 ml	10 ml	15 ml	1/1

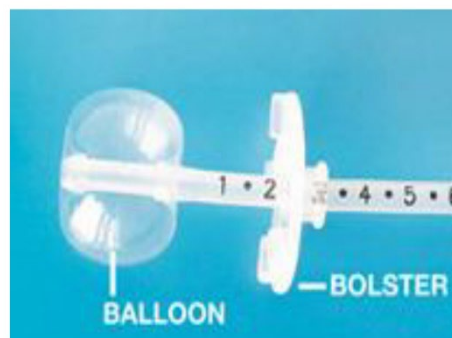

Os.pakk. = väh.til.määrä



Ballongin tarkistus

- Tarkista ballongin vesimäärä kerran viikossa
- Poista vesi ruiskulla ja tarkista, että vesimäärä on sama kuin sisään laitettu määrä
- Tyhjennä ruisku ja täytä se uudella vedellä edellä olevan taulukon mukaisesti

Edut potilaalle

- Joustava ja pehmeä silikoni parantaa käyttömukavuutta ja minimoi ihon ärsytyksen
- Ballongin muoto suojaa letkun kärkeä ehkäisten kudosaärsytystä ventrikelissä

Edut hoitajalle

- Erilliset lääke- ja ravintoportit
- Läpinäkyvä silikoni mahdollistaa selkeän näkymän venttiiliin
- Ihoa vasten tulevassa kiinnitysrenkaassa on pieni kosketuspinta ihoon
- Letkussa helppolukuiset mitat asettamisen helpottamiseksi

Vasta-aiheet potilaille, joilla:

- mahalaukku ei kiinnity vatsanseinämään
- ei pysyvää avannetta
- vatsan ärsytys
- todettu infektio
- useat avannekanavat
- epävarmuus avanteen suunnasta tai todettu granulaatiokudos

Tuotetta EI SAA
KOSKAAN käyttää
suonensisäisesti!



Os.pakk. = väh.til.määrä